

Anleitung

Anwendung von Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment



Die Farbpigmente, welche den Colour Liquid Prettau® Aquarell zur besseren Erkennbarkeit der Farbe beigemischt werden, können sich mit der Zeit verflüchtigen (z.B. bei zu heller Lagerung). Durch Zugabe von Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment können diese Farbpigmente wieder aufgefrischt werden. Dabei können die Farben je nach Belieben mehr oder weniger intensiv gestaltet werden.

Farbzuordnung:

Colour Liquid Prettau® Aquarell	A1 – D4	Cervical A-D	Incisal Blue	Incisal Grey	Incisal Violet	Orange 1	Brown 2	Tissue A-C
Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment	A1 – D4	Orange	Blue	Grey	Violet	Orange	Brown	Tissue

1 AUSGANGSSITUATION



Das ausbrennbare Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment wird zum Auffrischen von Colour Liquid Prettau® Aquarell verwendet. Achten Sie bei der Anwendung auf die richtige Farbzuordnung!

2 BIO-PIGMENT VORBEREITEN



Vor dem Gebrauch das Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment gut schütteln.

3 ÖFFNEN



Beide Flaschen öffnen.

4 BIO-PIGMENT HINZUFÜGEN



Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment dem Colour Liquid Prettau® Aquarell beifügen (1-2 Tropfen Bio-Pigment pro cm Flüssigkeit in der Flasche). Um eine noch intensivere Farbe zu erreichen kann je nach Belieben etwas mehr Bio-Pigment zugefügt werden.

5 MISCHEN



Die Flasche mit dem Colour Liquid Prettau® Aquarell gut schütteln, um die Flüssigkeiten zu vermischen.

6 MALEN



Das aufgefrischte Colour Liquid Prettau® Aquarell kann jetzt verwendet werden!



DRAA1271=