
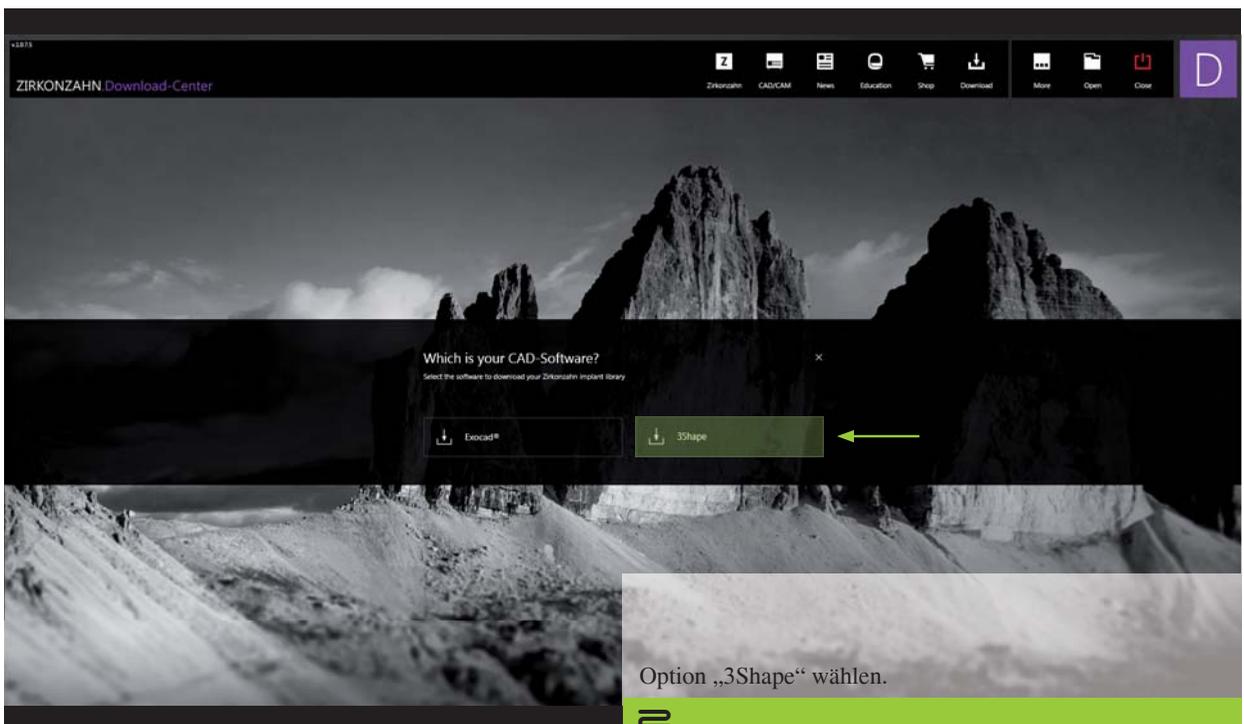


## Zirkonzahn.Download-Center

Anleitung zum Herunterladen von Bibliotheken für 3Shape



Version: 21.02.2019 – Seite 1 von 5

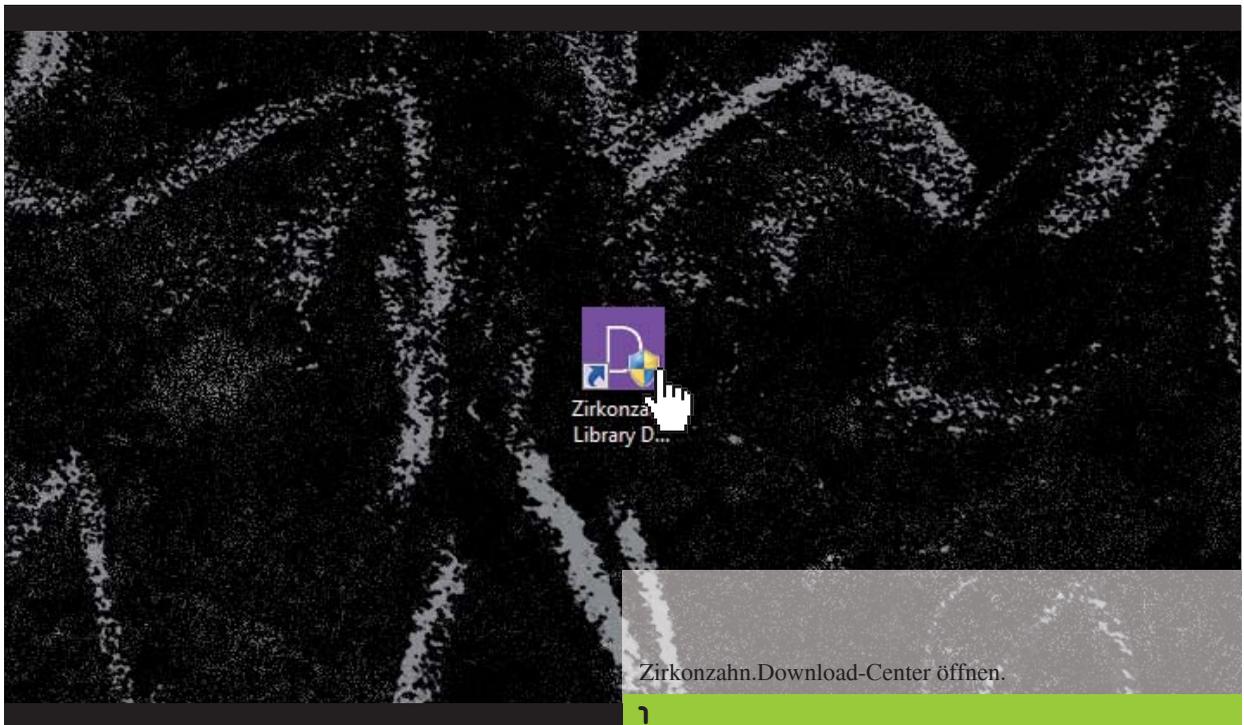

## Zirkonzahn.Download-Center

Anleitung zum Herunterladen von Bibliotheken für 3Shape


Version: 21.02.2019 – Seite 2 von 5

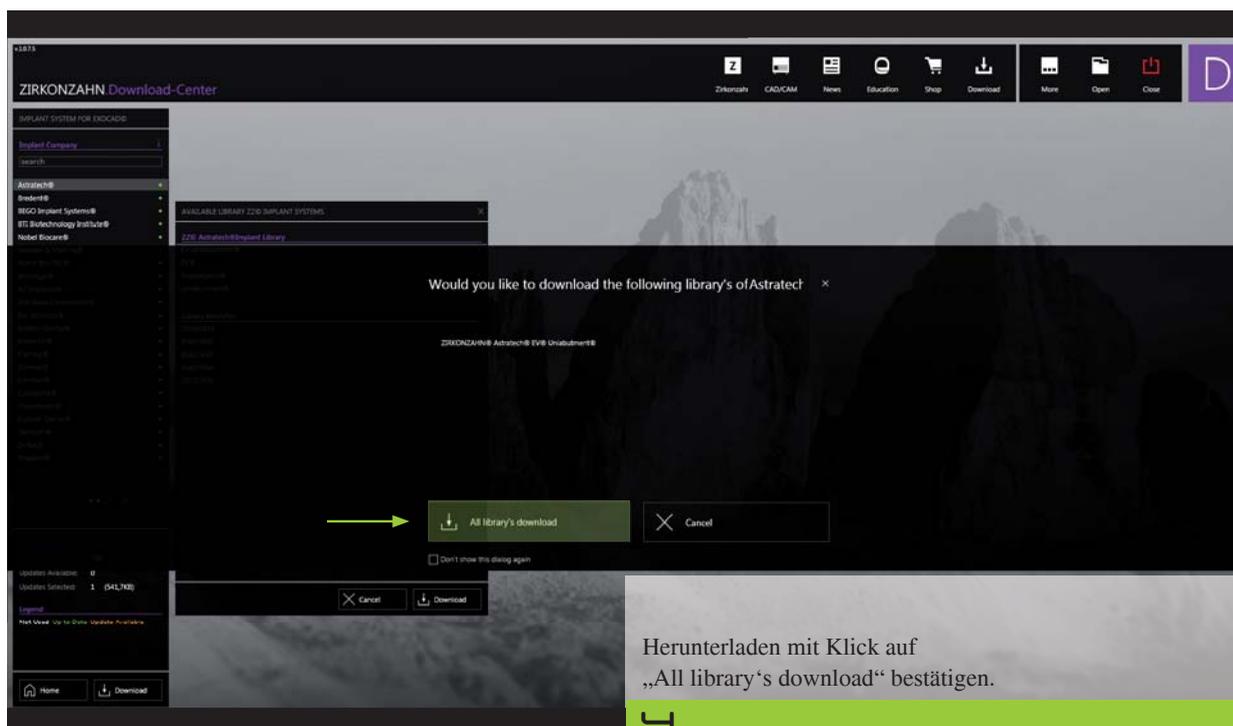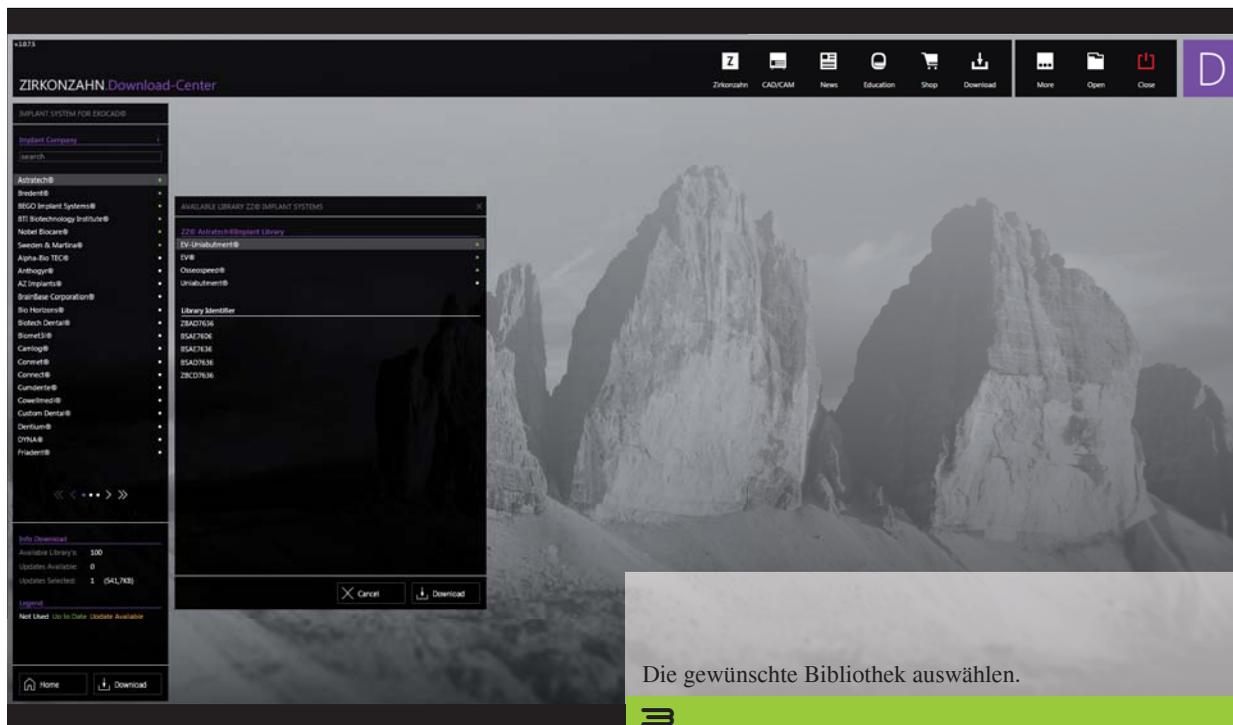

## Zirkonzahn.Download-Center


Anleitung zum Herunterladen von Bibliotheken für 3Shape

Version: 21.02.2019 – Seite 3 von 5

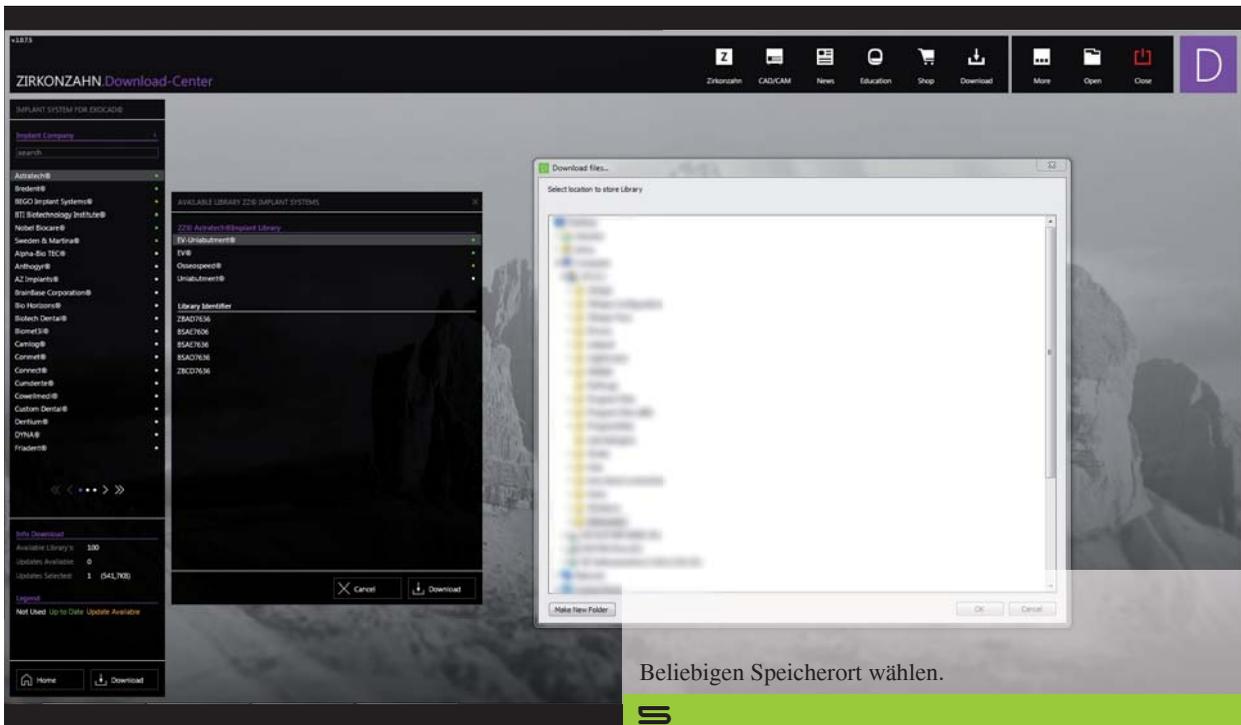

Beliebigen Speicherort wählen.

**5**

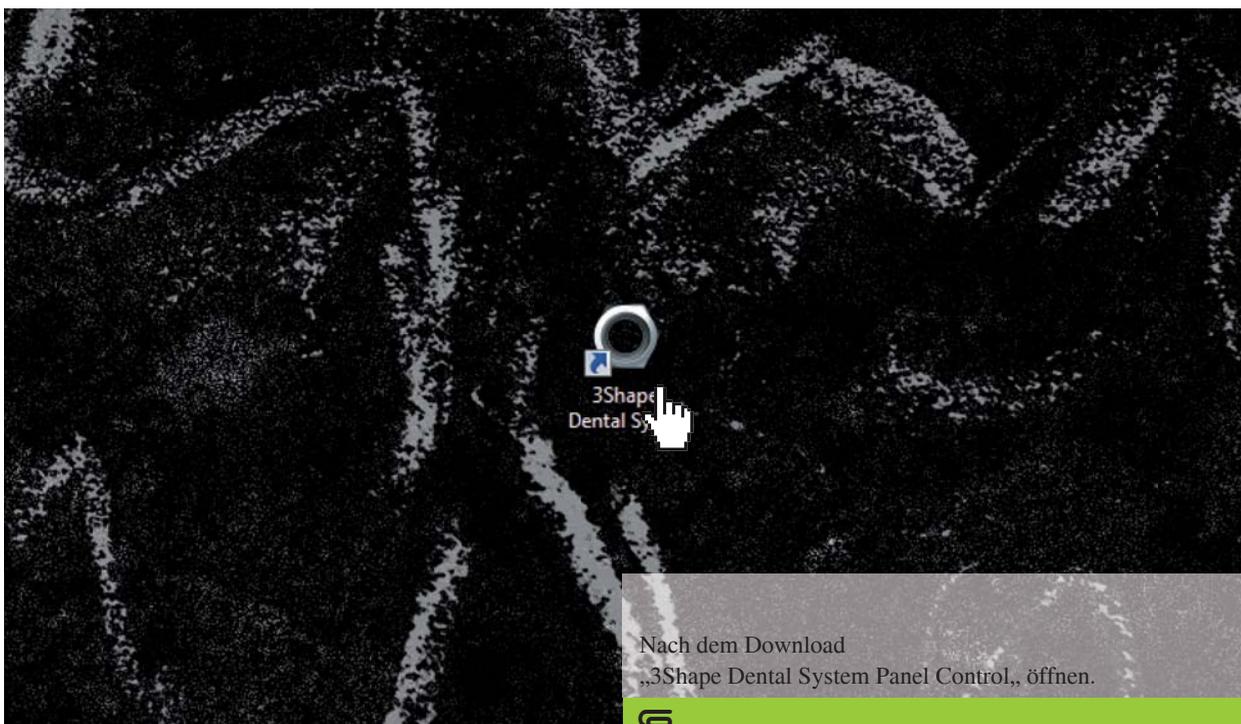


Nach dem Download  
„3Shape Dental System Panel Control.“ öffnen.


**6**

## Zirkonzahn.Download-Center

### Anleitung zum Herunterladen von Bibliotheken für 3Shape

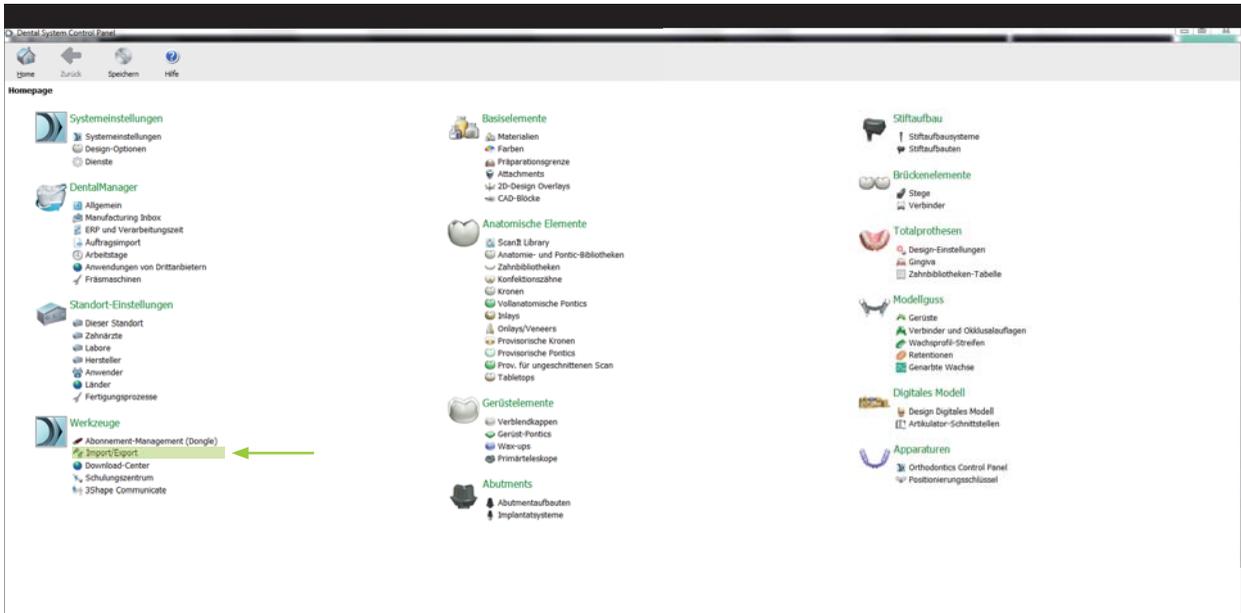

Im Abschnitt „Werkzeuge“ auf „Import/Export“ klicken.

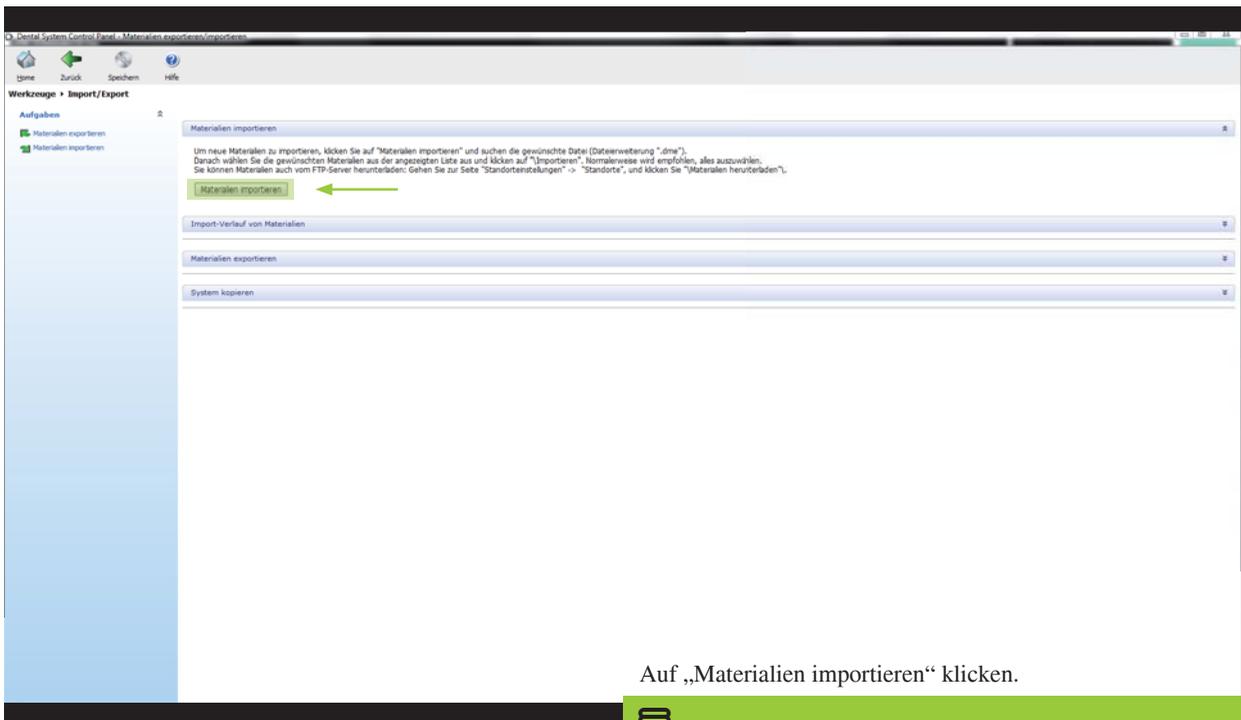


Auf „Materialien importieren“ klicken.




## Zirkonzahn.Download-Center

### Anleitung zum Herunterladen von Bibliotheken für 3Shape

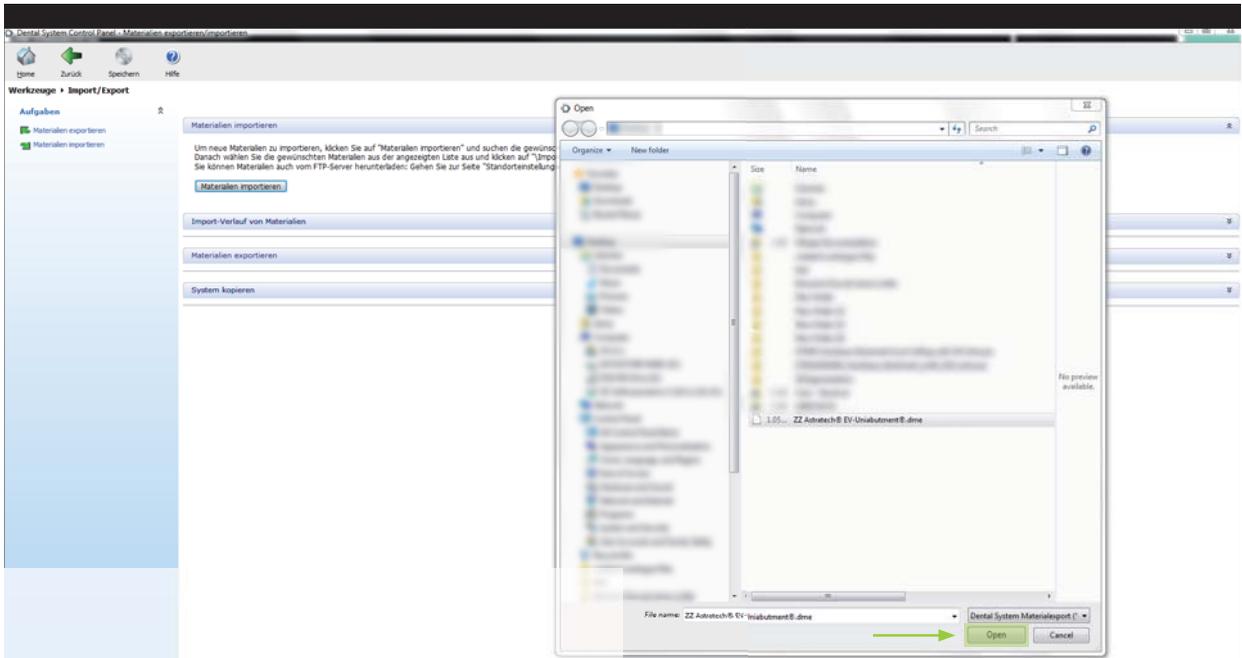

Die soeben gespeicherte Bibliotheksdatei öffnen.

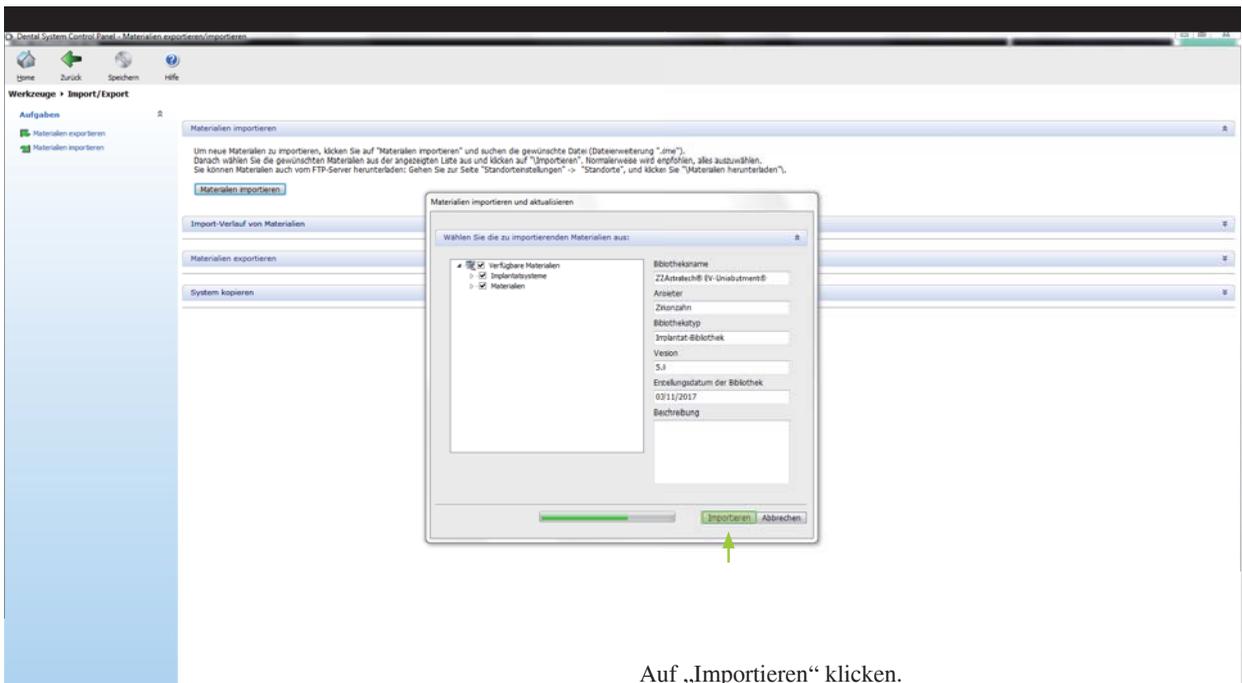

Auf „Importieren“ klicken.