




Zirkonzahn.Download-Center Comment télécharger les bibliothèques pour 3Shape

Version : 21.02.2019 – Page 1 de 5

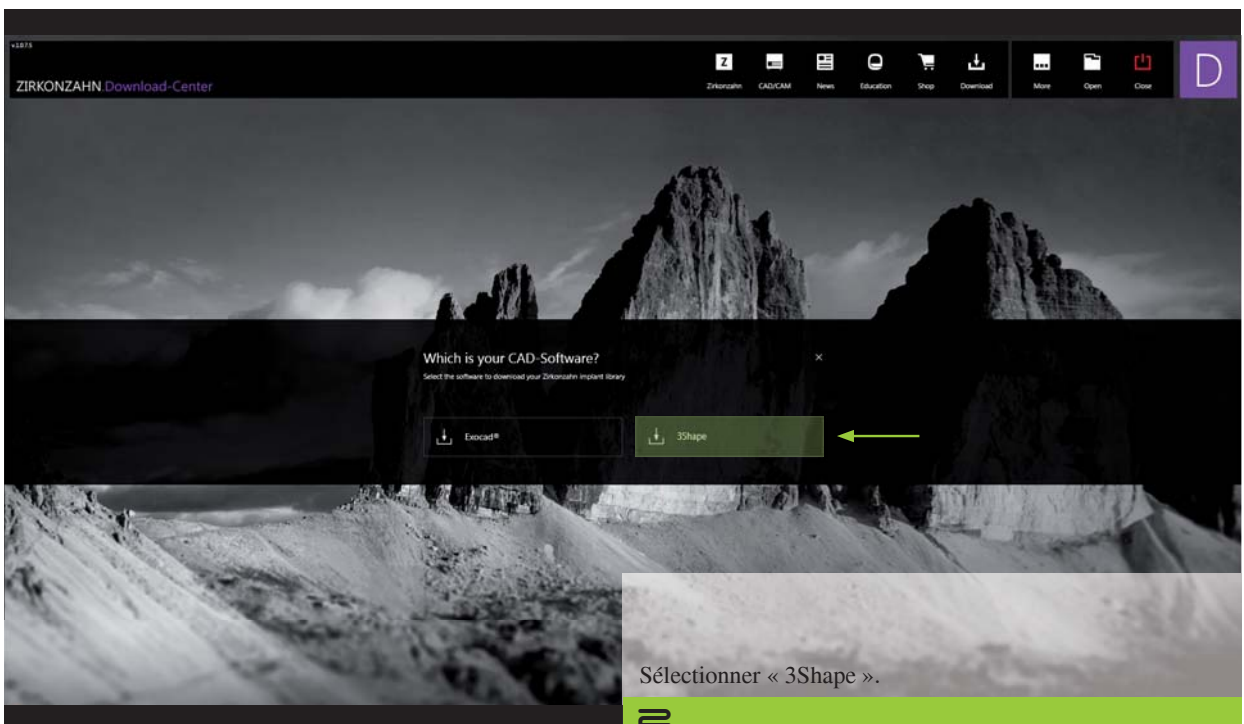


Zirkonzahn.Download-Center Comment télécharger les bibliothèques pour 3Shape

Version : 21.02.2019 – Page 2 de 5

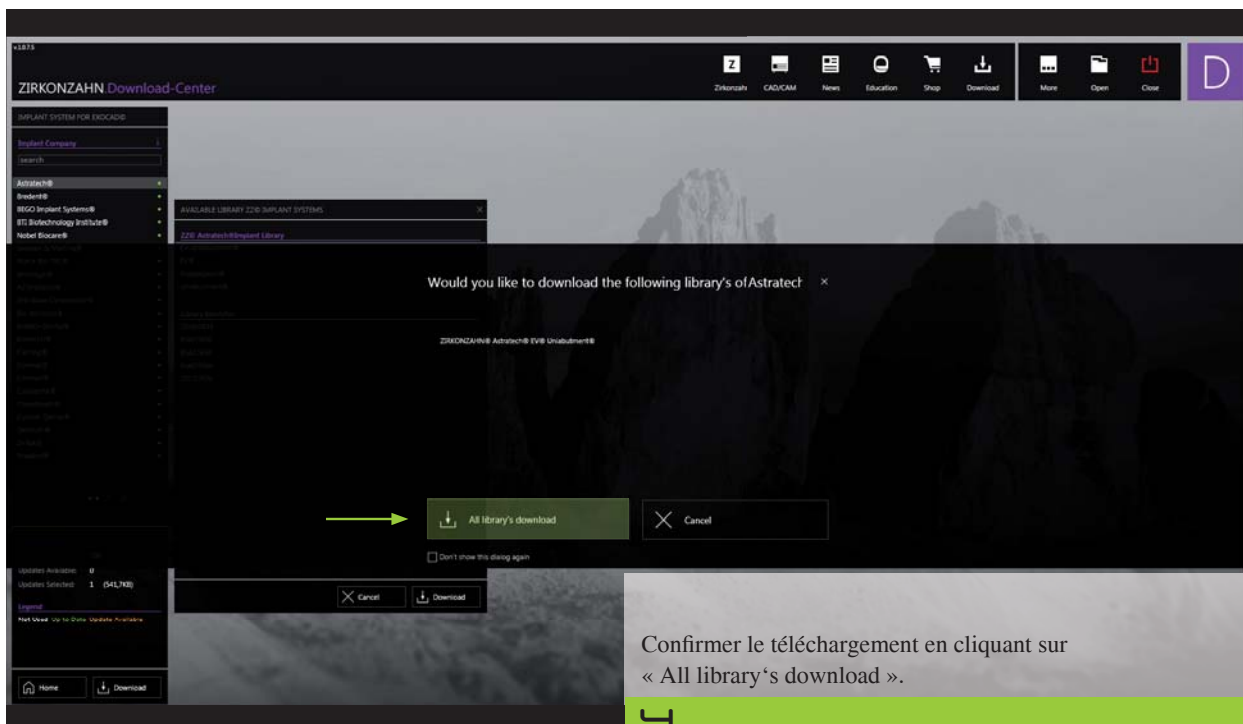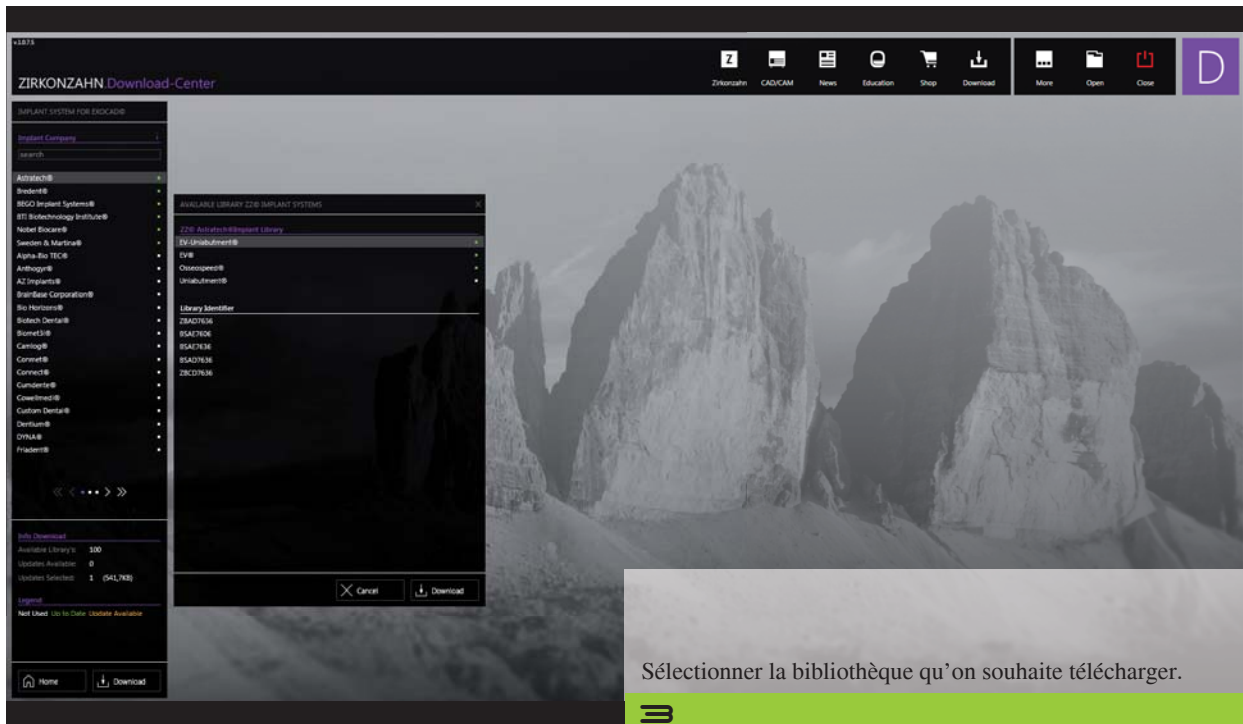


Zirkonzahn.Download-Center Comment télécharger les bibliothèques pour 3Shape

Version : 21.02.2019 – Page 3 de 5

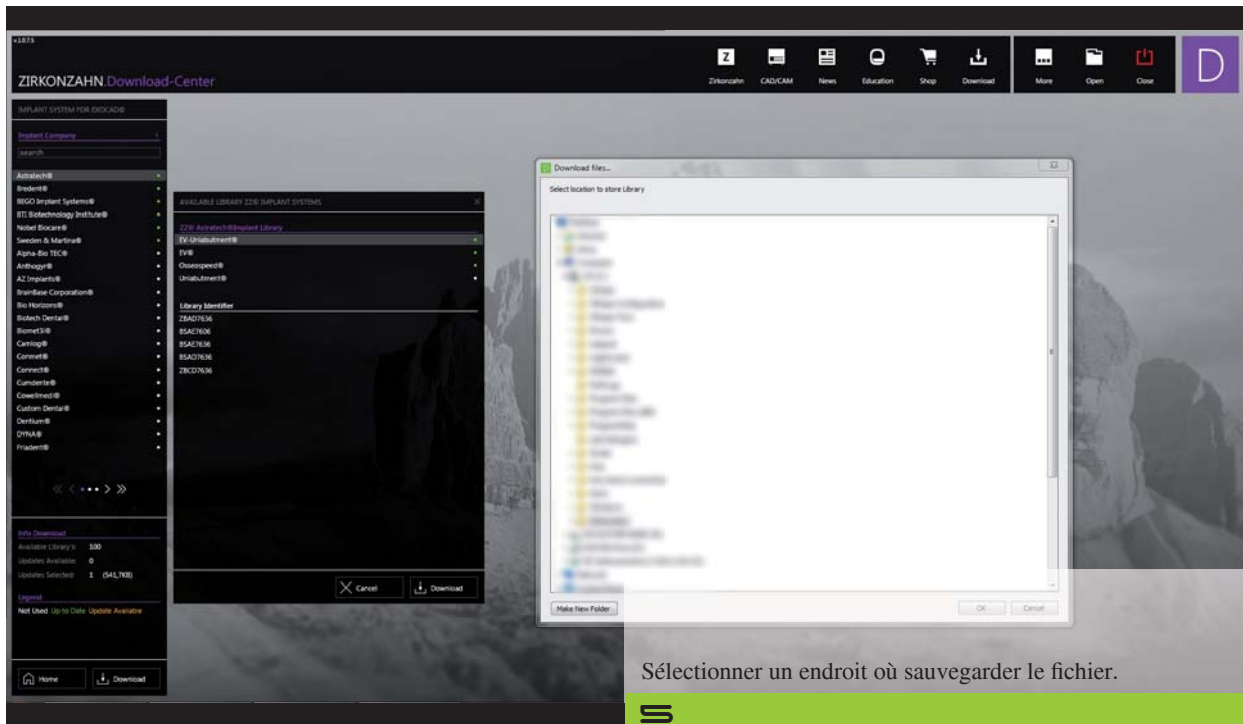

Sélectionner un endroit où sauvegarder le fichier.

5

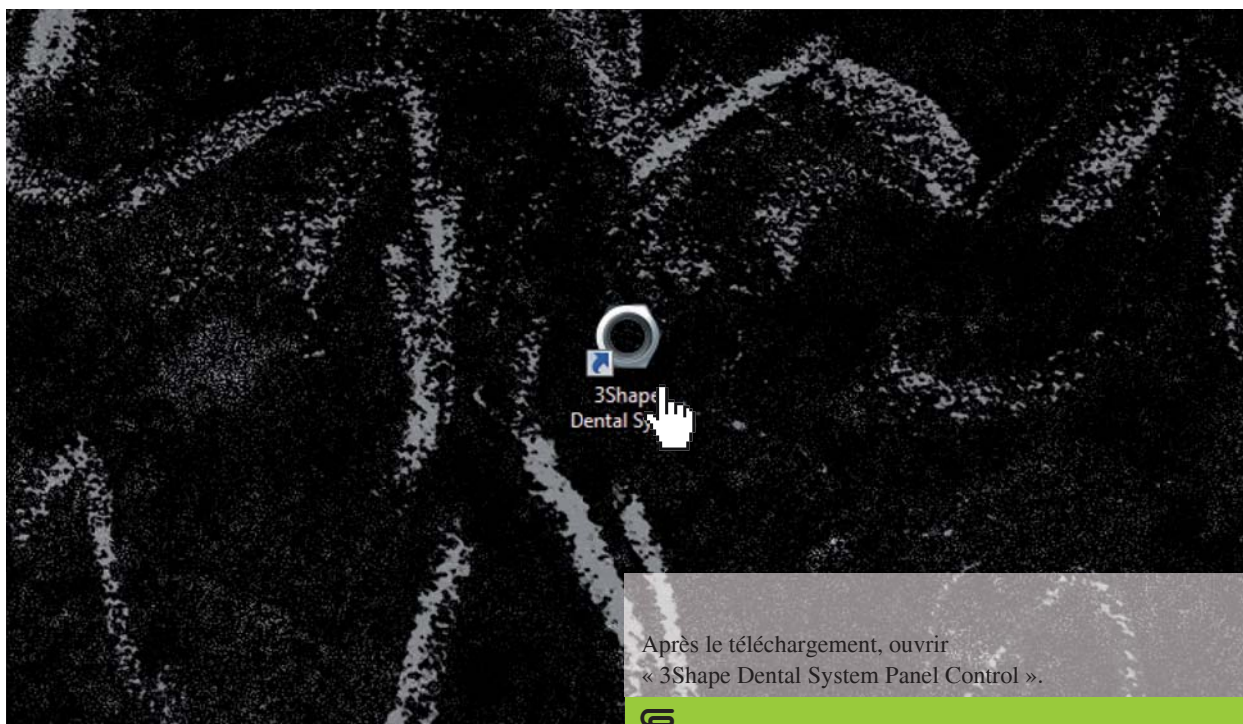


Après le téléchargement, ouvrir
« 3Shape Dental System Panel Control ».


6

Zirkonzahn.Download-Center Comment télécharger les bibliothèques pour 3Shape

Version : 21.02.2019 – Page 4 de 5

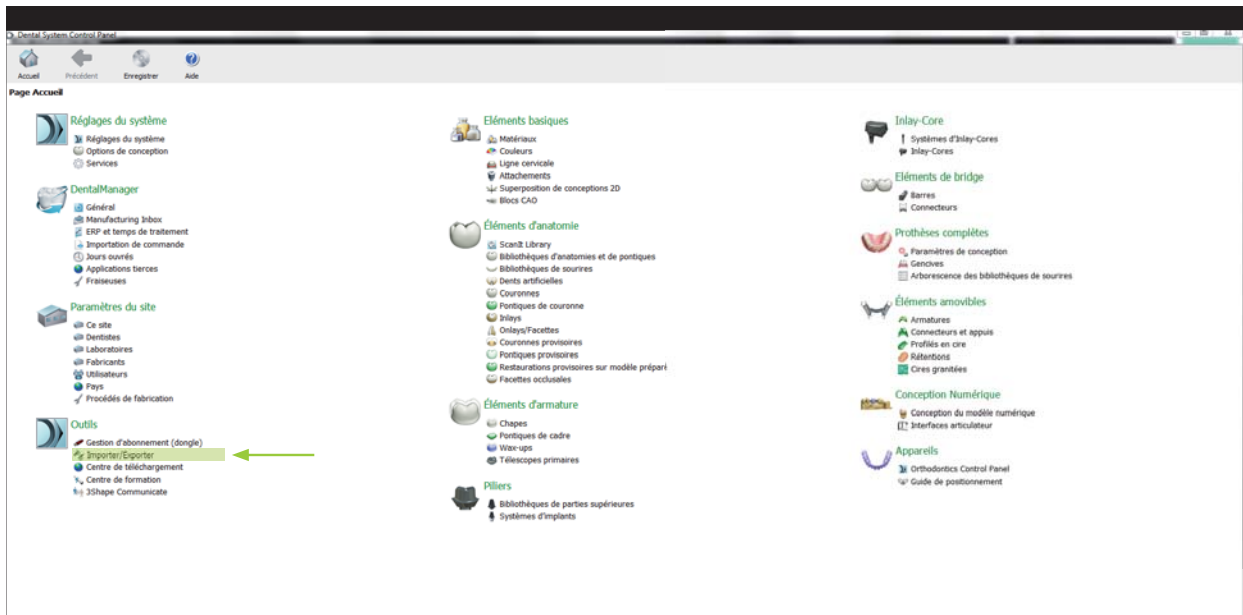

Cliquer sur « Importer/Exporter » dans la section « Outils ».

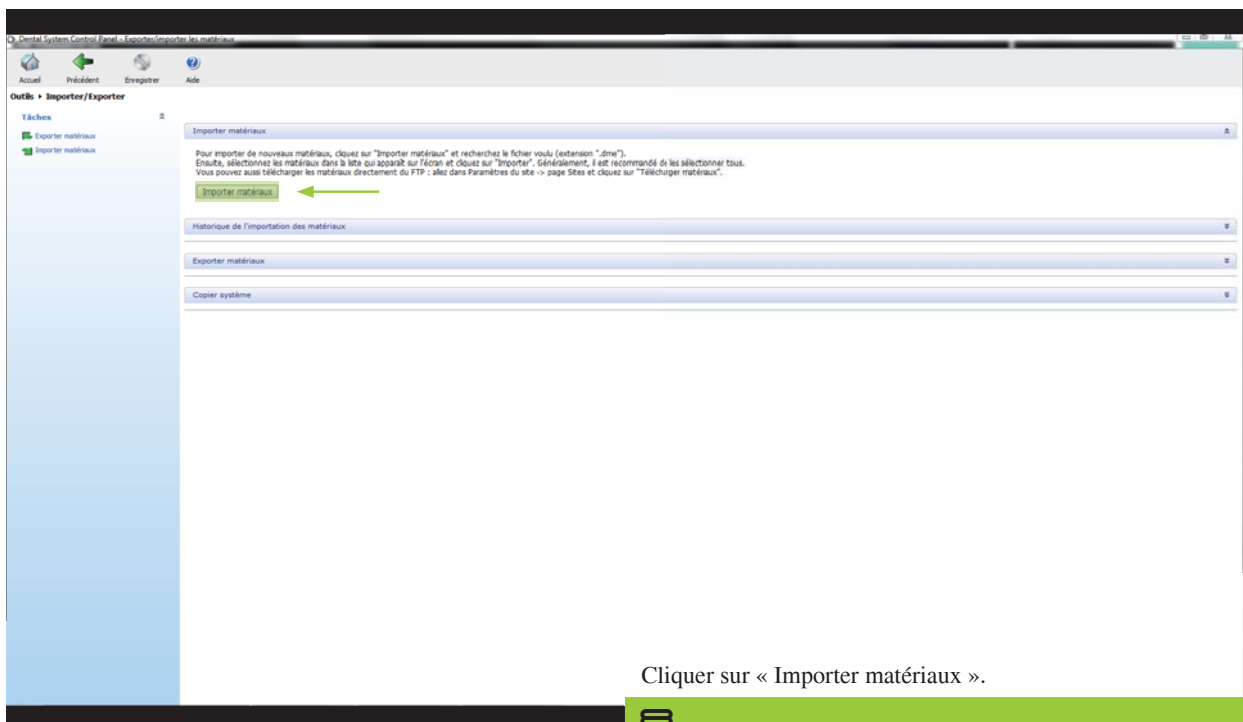

Cliquer sur « Importer matériaux ».

