



Céramique Transpa 1

Contenu : 20 g
Transparence très élevée

Numéro de référence :
KEAA2101



Céramique M2

Contenu : 20 g
Mamelon masse foncée


Numéro de référence :
KEAA3801



Céramique Transpa 2

Contenu : 20 g
Légère transparence

Numéro de référence :
KEAA2201

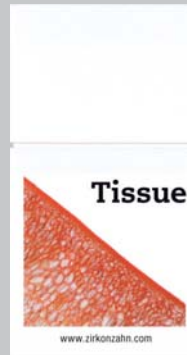

Céramique Tissue

Contenu : 20 g
Dentine couleur gencive


Numéro de référence :
KEAA2001



Céramique Transpa 3

Contenu : 20 g
Légèrement laiteux

Numéro de référence :
KEAA2301

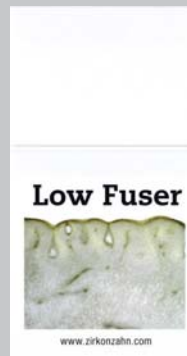

Céramique Low Fuser

Contenu : 20 g
Céramique à basse fusion

Numéro de référence :
KEAA3601



Céramique Transpa 4

Contenu : 20 g
Laiteux prononcé


Numéro de référence :
KEAA2401



Céramique Dentine Opaker

Contenu : 20 g
Dentine hautement fluorée


Numéro de référence :
KEAA1901

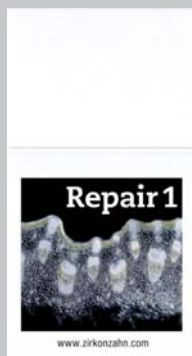

Céramique Repair 1

Contenu : 20 g
Pour réparer les obturations et les rallongements d'épaulements (couleur claire)


Numéro de référence :
KEAA3901

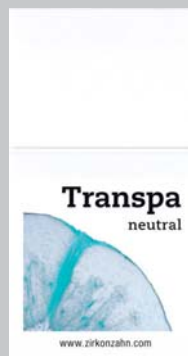

Céramique Transpa Neutre

Contenu : 20 g
Masse transparente neutre

Numéro de référence :
KEAA3001

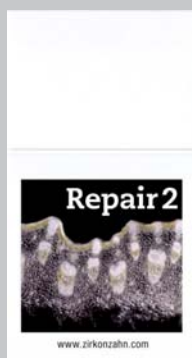

Céramique Repair 2

Contenu : 20 g
Pour réparer les obturations et les rallongements d'épaulements (couleur foncée)

Numéro de référence :
KEAA4001



Céramique Dentine Yellow

Contenu : 20 g
Dentine jaunâtre

Numéro de référence :
KEAA2901



Keramik Dentin Orange

Contenu : 20 g
Orangefarbenes Dentin, für den zervialen und okklusalen Bereich


Numéro de référence :
KEAA2801



Céramique M1

Contenu : 20 g
Mamelon masse claire


Numéro de référence :
KEAA3701

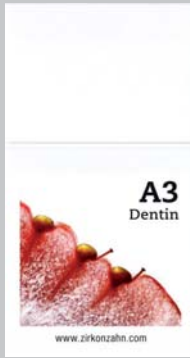

Céramique Dentine A3

Contenu : 20 g

Numéro de référence :
KEAA0301

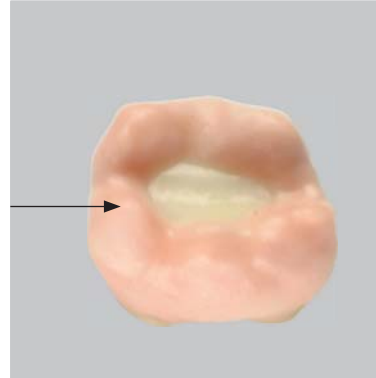

1^{ère} cuisson




Céramique Dentine Orange

Contenu : 20 g

Dentine orange pour la zone cervicale et occlusale

Numéro de référence :
KEAA2801

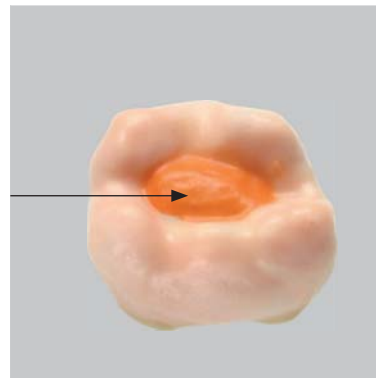

1^{ère} cuisson




Céramique Incisal S3

Contenu : 20 g

Pour la céramique
A3, A3,5, B3, C3, D2

Numéro de référence :
KEAA3401

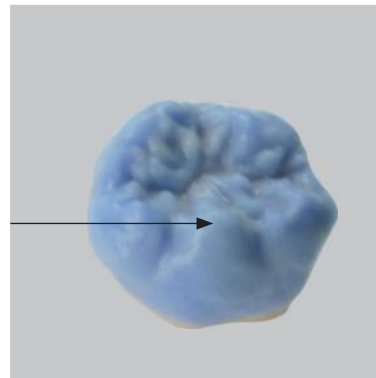

1^{ère} cuisson




Céramique Transpa 3

Contenu : 20 g

Légèrement laiteux

Numéro de référence :
KEAA2301

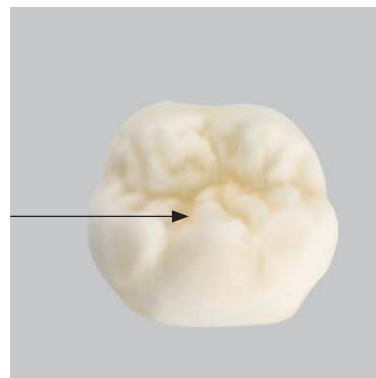

1^{ère} cuisson



RÉSULTAT



Céramique Dentine A3

Contenu : 20 g

Numéro de référence :
KEAA0301



1^{ère} cuisson



Céramique Incisal S3

Contenu : 20 g

Pour la céramique
A3, A3,5, B3, C3, D2

Numéro de référence :
KEAA3401



1^{ère} cuisson



Céramique Transpa 3

Contenu : 20 g

Légèrement laiteux


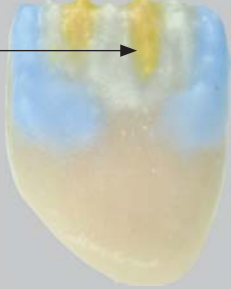

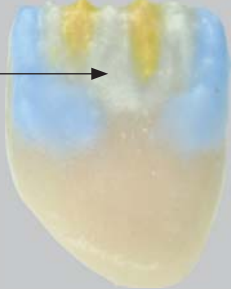

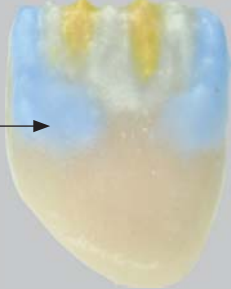



Numéro de référence :
KEAA2301



1^{ère} cuisson



RÉSULTAT

| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
|  | <p>Céramique Dentine Orange</p> <p>Contenu : 20 g <i>Dentine orange pour la zone cervicale et occlusale</i></p> <p>Numéro de référence : KEAA2801</p> |  | <p>2^{ème} cuisson</p> |
|  | <p>Céramique Transpa Grey</p> <p>Contenu : 20 g <i>Masse transparente légèrement grisée</i></p> <p>Numéro de référence : KEAA2601</p> |  | <p>2^{ème} cuisson</p> |
|  | <p>Céramique Transpa Blue</p> <p>Contenu : 20 g <i>Masse transparente légèrement bleutée</i></p> <p>Numéro de référence : KEAA2701</p> |  | <p>2^{ème} cuisson</p> |
|  | <p>Céramique Transpa 3</p> <p>Contenu : 20 g <i>Légèrement laiteux</i></p> <p>Numéro de référence : KEAA2301</p> |  | <p>2^{ème} cuisson</p> |
|  | | | <p>RÉSULTAT</p> |