

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU ZIRKON

Prettau Zirkon

Prettau Brücken können auch teilanatomisch modelliert werden: was man normalerweise in Dentin schichten würde, wird in diesem Falle in Prettau Zirkon gefräst. Dies bringt den Vorteil, dass der Zahn nur mit einer ganz dünnen Schmelzschicht überschichtet wird. Das bringt Zeitersparnis mit sich, erhöht die gesamte Festigkeit der Brücke und reduziert das Chipping der Schichtkeramik fast zur Gänze.

Die Brücke wird im Rohzustand mit den Prettau Colour Liquids individuell eingepinselt und dann gesintert. Die fertig gesinterte Brücke wird dann nur noch mit verschiedenfarbigen Schmelzmassen in einer Dicke von circa 0,3-0,5 mm überschichtet. Zu beachten ist dabei, dass die gesamte Brücke mit Schmelz überschichtet werden soll. So erreicht man eine hervorragende Tiefenwirkung.

Durch die exzellente Transluzenz des Prettau Zirkons erzielt man genau das gleiche Ergebnis wie beim Überschichten desselben Gerüsts mit Dentin und Schneide.



Prettau Zirkon

Aldo Zilio, Italien



Dentingerüst aus 100% Prettau Zirkon



Zirkonzahn®



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN World Wide - Tel +39 0474 066 680 - info@zirkonzahn.com - www.zirkonzahn.com



Gefräst mit Zirkonzahn Frässystem



WEAA5305=