

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology





PRETTAU[®] 2 DISPERSIVE[®] ZIRKON

Individuell gestaltet nach Zirkonzahn Kultur

PRETTAU® 2 DISPERSIVE® – INDIVIDUELL BEMALT UND IM ZAHNFLEISCH VERBLENDET

KEINE LIMITATIONEN – MONOLITHISCH GEFERTIGT, INDIVIDUELL GESTALTET

ZT Federico Presicci, Dentallabor Antonio Lazetera, Savona, Italien

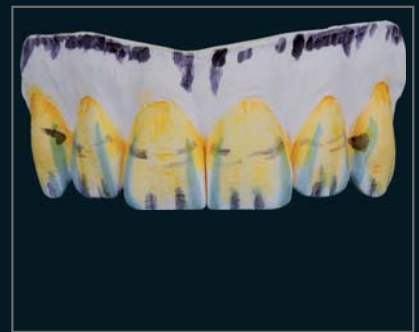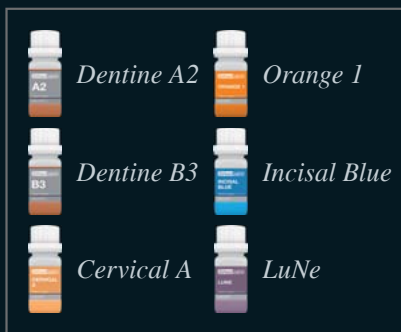


Die voreingefärbte Zirkonstruktur aus Prettau® 2 Dispersive® wird hier durch die manuelle Bemalung mit Colour Liquid Prettau® 2 Aquarell A2 und B3 sowie Intensivfarben weiter individualisiert. Da das Zirkon bereits während der Herstellung mit natürlichem Farbverlauf versehen ist, kann auf diese Bemalung auch verzichtet werden.



Die Zähne der dichtgesinterten Struktur werden durch das Aufbrennen von Malrfarben ICE Stains 3D by Enrico Steger akzentuiert.



Mit einem Washbrand aus ICE Ceramics Dentine Yellow, Transpa Neutral sowie Tissue 6 werden Zahnwurzeln und die Grundfarbe der Gingiva gestaltet.

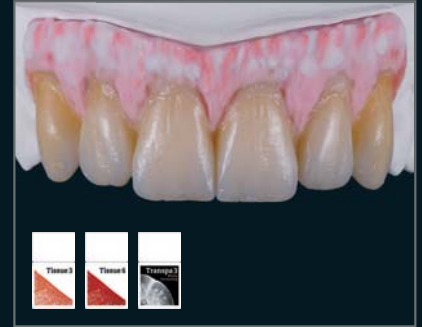

Mit verschiedenen Tissuemassen sowie Transpa 3 wird das Zahnfleisch weiter charakterisiert. Farbnuancen werden eingearbeitet.



Mit Tissuemassen 2, 3 und 6 wird nun die Gingivaform gestaltet.



Über einen weiteren Keramikbrand wird die Form final definiert und mit einem Korrektur- und Glasurbrand fertiggestellt.



Individuell kolorierte und im Gingivabereich verblendete Prettau® 2 Dispersive® Struktur

NEU! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- Mit natürlichem Farbverlauf voreingefärbtes Zirkon mit besonders hoher Transluzenz und außerordentlicher Biegefestigkeit
- Keine Limitationen! Besonders geeignet für monolithische zirkuläre Brücken, aber auch für Einzelkronen, Inlays, Onlays, Veneers, Stege und mehrgliedrige Brücken verwendbar (reduziert oder vollanatomisch)
- Kein Keramikchipping (durch monolithische Gestaltung), keine Abrasion gegenüber dem Antagonisten
- Auf Wunsch patientenindividuell charakterisierbar mit Colour Liquid Prettau® Aquarell Intensivfarben, Keramik ICE Ceramics sowie Malfarben ICE Stains 3D by Enrico Steger




HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NEU! FRÄSGERÄT M2 DUAL WET HEAVY METAL

EINE MASCHINE,
ZWEI FRÄSKAMMERN

FLEXIBEL EINSETZBARES FRÄSGERÄT
ZUR SEQUENTIELLEN NASS- UND
TROCKENBEARBEITUNG OHNE
ZWISCHENREINIGUNG

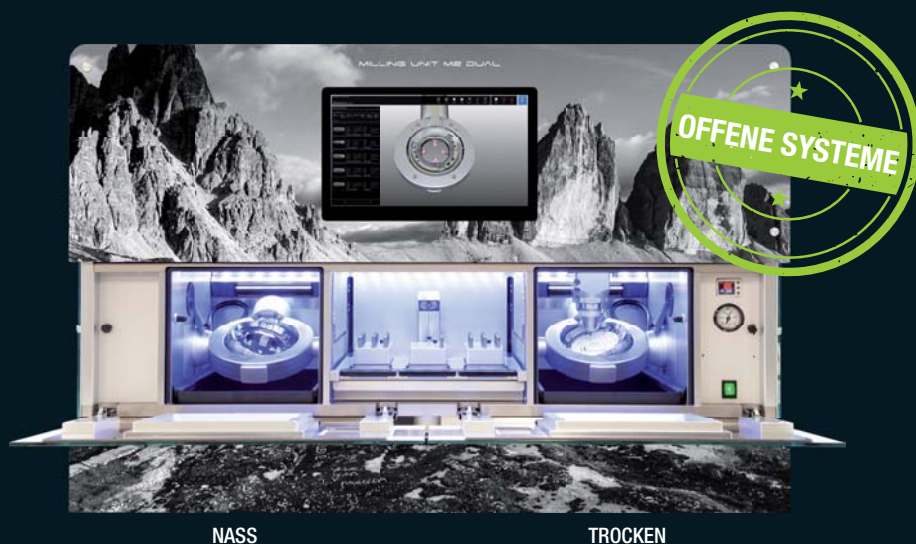

NASS

TROCKEN



WEAB3537DE=