


Zirkonzahn®


Human Zirconium Technology

ERLEBEN SIE DIE
SOFTWARE-NEUHEITEN
LIVE IN UNSEREN
EDUCATION CENTERN
ODER AUF DER
VORTRAGSTOUR VON
ENRICO STEGER
.....
WWW.ZIRKONZAHN.COM

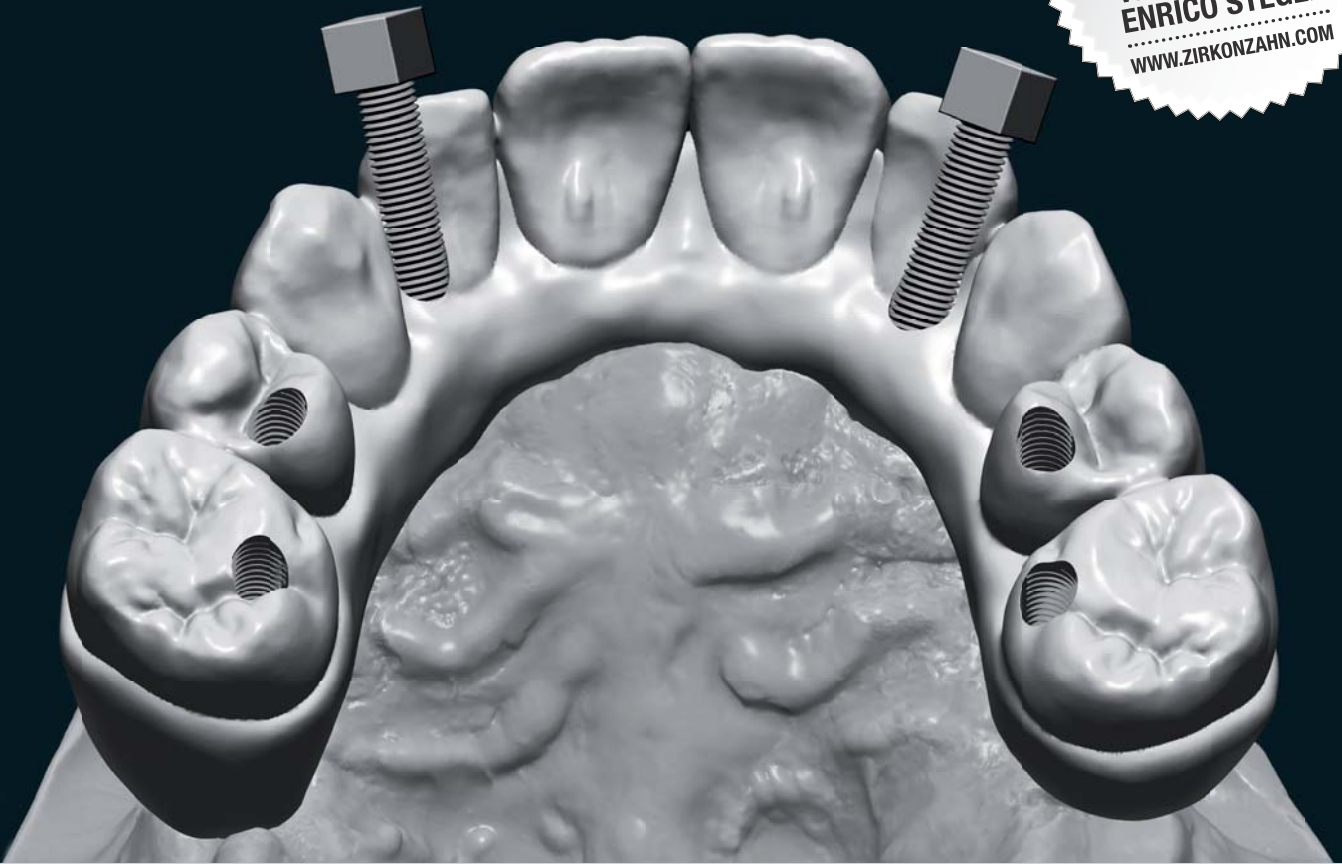

SOFTWARE UPGRADE

Schneller, einfacher, individueller

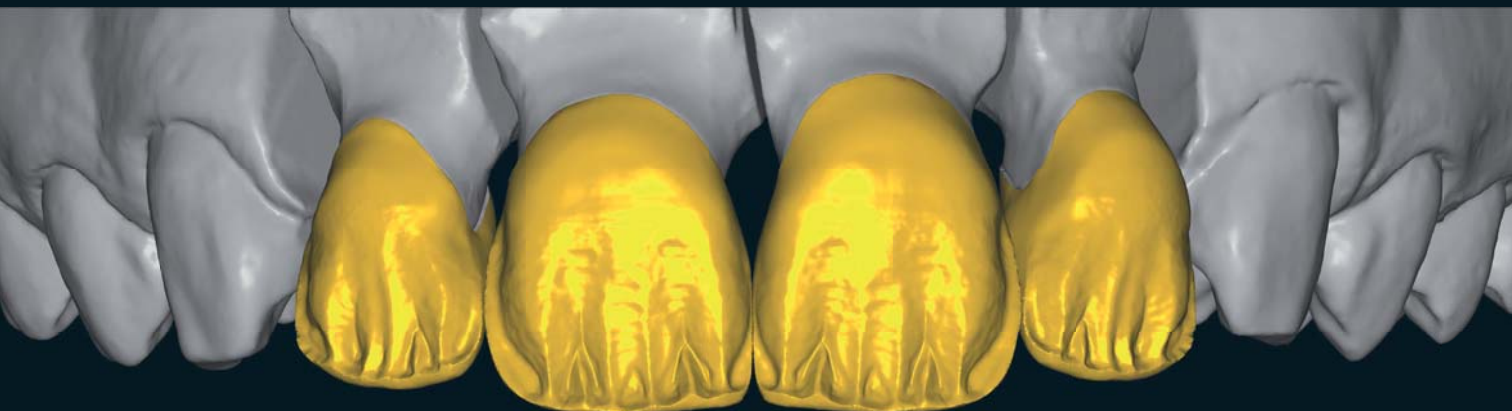




Das neue puristische Design zieht sich nun einheitlich durch alle Softwarebereiche

SOFTWARE UPGRADE

Zeitersparnis, intuitives Bedienen sowie die Vereinfachung selbst komplexester Arbeitsabläufe sind nur einige der zahlreichen Bedingungen, die eine gute Software zu erfüllen hat. Die bewährte Zirkonzahn CAD/CAM-Software wurde von Zahntechnikern entwickelt und geht deshalb genau auf diese Kriterien ein.

*Durch den kontinuierlichen Erfahrungsaustausch mit unseren Kunden und durch konsequente Weiterentwicklung verfolgen die Zirkonzahn Softwareentwickler zudem das Ziel, den digitalen Workflow so intuitiv und einfach wie möglich zu gestalten und gleichzeitig eine Fülle an Optionen zu bieten. Das aktuelle Upgrade der Zirkonzahn CAD/CAM-Software bringt neue noch direktere Möglichkeiten und zeitsparende Features sowie eine **komplett neue Nesting-Software**. Das vereinfachte und einheitliche Design der Softwareoberfläche und die neuen Tools sorgen für eine unkomplizierte Handhabung und liefern viele praktische Tricks für großartige Ergebnisse.*


UPGRADE BEI GÜLTIGEM SERVICEVERTRAG KOSTENLOS!

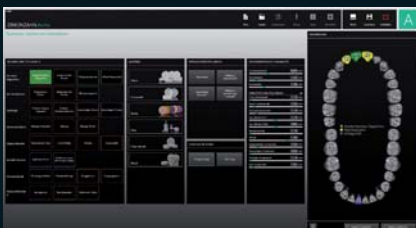

Die Archiv-Software Zirkonzahn.Archiv verfügt jetzt über einen neu gestalteten intelligenten Menüaufbau.



Archiv

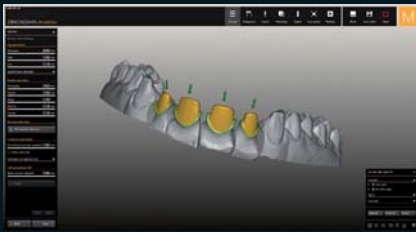


Der Software-Assistent „Wizard“ mit integrierten Pop-Up Nachrichten führt den Anwender durch die einzelnen Schritte des Arbeitsprozesses.



Modeller



Dem fortgeschrittenen Techniker bietet das „Master Menu“ mehrere hundert individuell konfigurierbare Parameter für mehr Individualität und noch genauere Details.

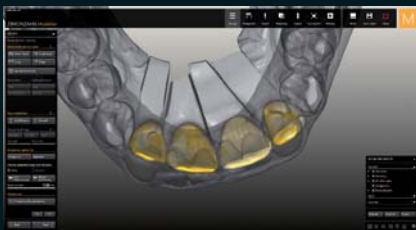

Durch die Integration der Funktion „An Antagonisten anpassen“ in das „Freiform-Tool“ wurde die Modellation, insbesondere bei komplexen Konstruktionen, extrem vereinfacht.




Geschiebe lassen sich jetzt nachträglich einfach an Kronen oder Teleskopkronen anhängen, ohne dass diese Option vorher im Archiv ausgewählt werden muss.




Details wie Fissuren oder Präparationsgrenzen werden mit dem Update der Modeller- und Nesting-Software noch präziser dargestellt und umgesetzt.



Die vordefinierten Zahnformen der Zahnbibliothek Heroes Collection wurden mit vier aufwendig gestalteten Cut-Back-Designs ergänzt.

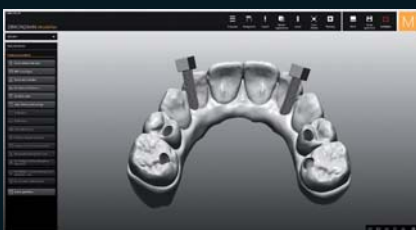

Schraubenkanäle mit Gewinde können nun in der digitalen Restauration positioniert werden.

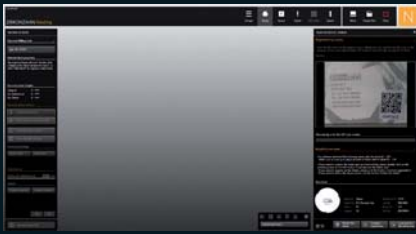


KOMPLETT NEU! EXKLUSIV BEI ZIRKONZAHN

Mit der praktischen Blockregistrierung per Webcam werden Fehlerquellen beim manuellen Registrieren des Blockes ausgeschlossen.



Positioniert man die Restauration außerhalb des Blockes, bringt sie die Software automatisch an den idealen Platz am Rand des Blockes.

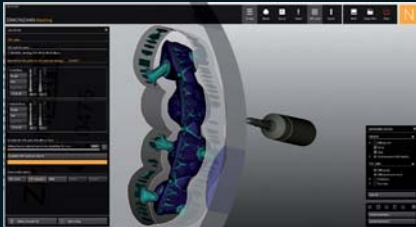

Mit den neuen Frässtrategien ist es selbst bei starken Unterschnitten oder Divergenzen möglich, auf Anhieb eine perfekte Passung zu erreichen.

Aufgrund einer besseren Abstimmung der Hintergrundprozesse hat sich die Berechnung der Frässtrategien extrem reduziert.

Die Fräsbahnen mehrerer Arbeiten können nun gleichzeitig berechnet werden.

Zur Überprüfung der Fräsbahnen wird das Fräsergebnis auf Wunsch automatisch simuliert.




Nesting

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Erstellen von Schraubenkanälen mit Gewinden zum einfachen Entfernen der Restauration

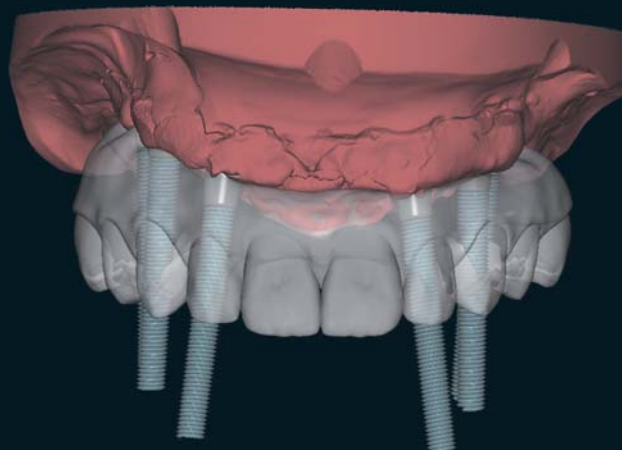

WEAB5322=