

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

La Cultura Zirkonzahn

PUENTE PRETTAU® 2 DISPERSIVE® SOBRE BARRA DE TITANIO ANODIZADA

Situación inicial: Paciente anciano. Maxilar superior desdentado con 4 implantes

Solicitud del paciente: Cambiar su antigua restauración estética y funcionalmente inadecuada por un Puente en zirconia



Datos del paciente: Fotos, modelos con implantes y escaneos intraorales de la antigua restauración

Rehabilitación planeada: Puente Prettau® 2 Dispersive® monolítico sobre barra de titanio, estratificación de la gingiva

Fases de elaboración:

- Creación del primer set up de los dientes con el Zirkonzahn.Modellier, basado en los escaneos intraorales y modelos. Adaptación individual de anatomías dentales seleccionadas de la "Heroes Collection", biblioteca virtual de Zirkonzahn de dientes completos con raíces
- Modelación de la barra de titanio con el Zirkonzahn.Modellier basado en el wax-up de la restauración prevista; fresado y digitalización de la barra
- Adaptación digital de la estructura planificada, control en el articulador virtual
- Fresado de la estructura de zirconia en la fresadora de Zirkonzahn
- Ligera acentuación del color y sinterización de la estructura
- Personalización para una estética apropiada a la edad: coloración con ICE Stains 3D by Enrico Steger, estratificación en las zonas gingivales con la cerámica ICE Ceramics
- Control sobre el modelo, anodización de la barra y cementación

Resultado: Puente Prettau® con estética y funcionalidad óptima gracias a la perfecta colaboración del técnico y dentista; después de la inserción de la restauración, el paciente estaba muy satisfecho y feliz.

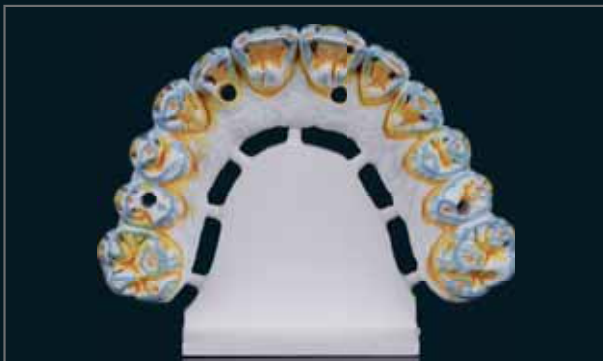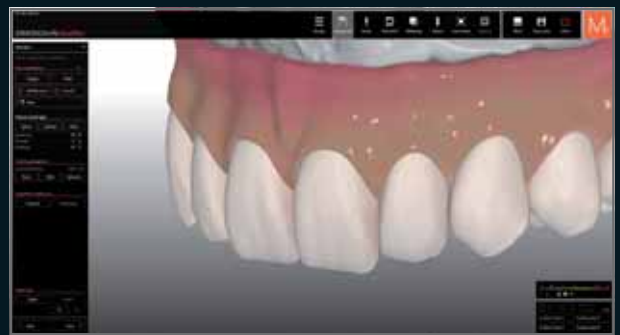

100 % DISEÑO MONOLÍTICO, ESTRATIFICADO SÓLO EN LA ZONA GINGIVAL

*TPD Federico Presicci, Laboratorio dental de Antonio Lazetera, Savona, Italia
Dr. Massimo Callerio, Cassolnovo, Italia*



¡NUEVO! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- Zirconia policromática altamente translúcida, con colores naturales esfumados y una elevada resistencia a la flexión
- ¡Sin límites! Especialmente indicada para arcadas completas monolíticas, así como coronas individuales, inlays, onlays, veneers, barras y puentes de varias unidades (completamente anatómicas o reducidas)
- No se producen fracturas (chipping), debido al diseño monolítico. No provoca abrasión al antagonista
- Permite la caracterización individual de la restauración con el Colour Liquid Prettau® 2 Aquarell Intensiv, ICE Ceramics y ICE Stains 3D by Enrico Steger



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



¡NUEVO! GAMA DE FRESADORAS CONFORT M2

Ahora con la Teleskoper Orbit XL para bloques de Ø 95, 98, 106 y 125 mm y para bloques de vitrocerámica y Raw-Abutment®. Reposicionamiento de los discos con una precisión en el orden de µm.



WEAB2678ES=