

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



**BASES DE TITANIO
K80 ANGLED SCREW CHANNEL**

La Cultura Zirkonzahn




BASE DE TITANIO K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)

Las bases de titanio K80 Angled Screw Channel (ASC) combinan dos ventajas en un producto: Por un lado se caracterizan por su chimenea especialmente larga, que garantiza una distribución óptima de la fuerza en la restauración lo cual hace posible que la estructura sea más estable. Por otro lado, la apertura lateral permite desplazar el ángulo del canal del tornillo de 0° a 30° para compensar las posiciones no ideales del implante. La altura de la base de titanio también puede adaptarse a los dientes del paciente, cortando la base de titanio con un disco de separación en las marcas de corte. Estas marcas también aumentan la superficie de contacto y, por lo tanto, garantizan una adhesión óptima del cemento. Dependiendo del uso, las bases de titanio K80 Angled Screw Channel, están disponibles con o sin conexión anti rotación al implante. El bloqueo anti rotación adicional en la chimenea, garantiza que la restauración cementada no gire.

Especialmente en la región anterior, el uso de bases de titanio estándar en el caso de implantes divergentes, puede dar lugar a resultados antiestéticos debido a la exposición labial de los canales de los tornillos. Gracias a la angulación del canal de los tornillos de 0° a 30°, es posible compensar las posiciones desfavorables de los implantes con las nuevas bases de titanio K80 Angled Screw Channel (ASC) y evitar así comprometer el resultado estético final de la restauración.

Todas las bases de titanio de Zirkonzahn también están disponibles doradas para aumentar la biocompatibilidad, la mimetización y reducir el tono gris de la restauración. También se pueden anodizar en diferentes colores con el Titanium spectral-colouring Anodizer.

Las bases de titanio K80 Angled Screw Channel (ASC) son adecuadas para las restauraciones cementadas.

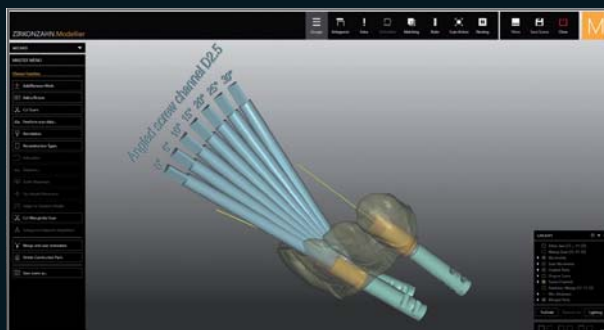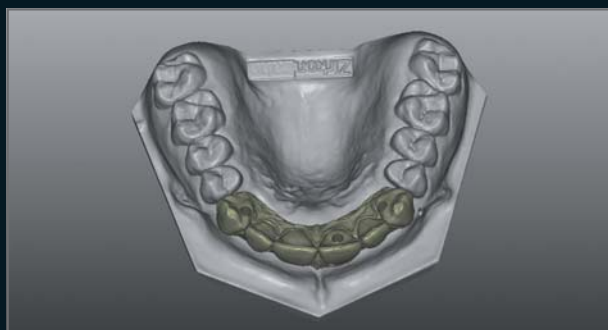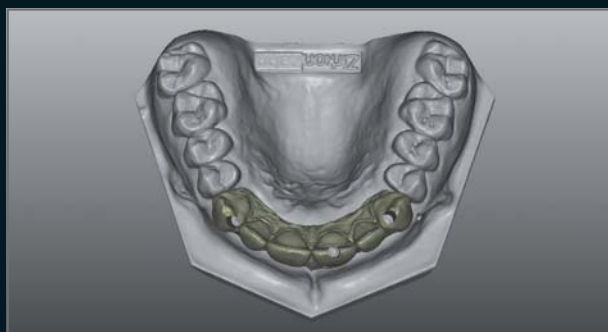

100% ESTÉTICA, GRACIAS A SOLUCIONES INTELIGENTES

BASES DE TITANIO CÓNICAS NON HEX




**BASES DE TITANIO NON HEX
K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)**





BASE DE TITANIO K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)

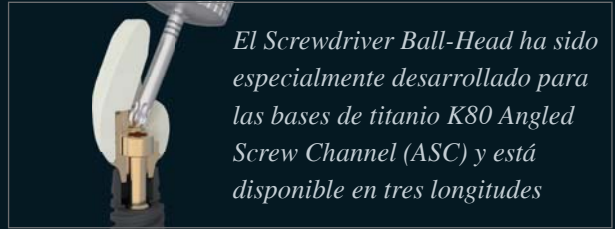

BASE DE TITANIO NON HEX K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)

- Para puentes

BASE DE TITANIO HEX K80 ANGLED SCREW CHANNEL (ASC)

- Para coronas individuales




- Disponibles con o sin conexión anti rotación al implante; equipado con un bloqueo anti rotación adicional en la chimenea. Cuenta con marcas de corte para personalizar la altura
- Disponibles también en tono dorado, para aumentar la biocompatibilidad, la mimetización y reducir el color gris de la restauración
- Apertura lateral para desplazar el ángulo del canal del tornillo de 0° a 30° y compensar las posiciones divergentes del implante
- Altura de la chimenea de la base de titanio ajustable en función a la longitud del diente

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

Si desea conocer a nuestros afiliados comerciales en su propio país, consulte nuestra página web

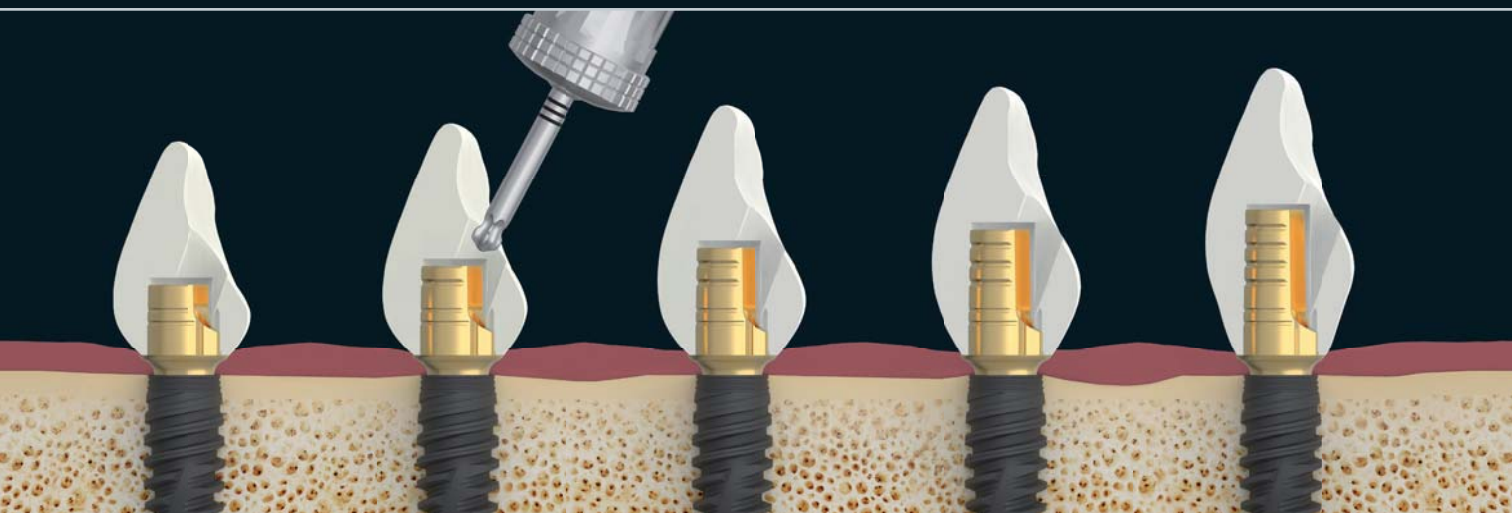

WEAB3544ES=