

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



GLAZE FLUO

Pasta de glaze para reprodução da fluorescência natural

Dente natural

Dente em zirconia Prettau® 2 com Glaze Fluo

GLAZE FLUO

Num piscar de olhos detetamos a cor de um dente natural. O que parece tão simples é o resultado de uma rede complexa de diversos fatores tais como estrutura e superfície do dente, características de translucidez e fluorescência, brilho e reflexo da luz. E é por este motivo que para o técnico de prótese dentária a reprodução da cor natural do dente representa uma operação muito exigente. Se se quer imitar a natureza o melhor possível, não é suficiente seguir o guia das cores Vita. Isto torna-se particularmente evidente quando se observam dentes naturais e restaurações dentárias sob luz ultravioleta, onde o dente natural exibe uma fluorescência branca azulada, as restaurações em zirconia, pelo contrário apresentam uma cor cinzenta escura. Através da aplicação da pasta de Glaze Fluo podem-se dar agora às restaurações dentárias características naturais de fluorescência. Os efeitos de cor daí resultantes são visíveis não só sob luz negra, mas também à luz do dia. Estruturas em zirconia revestidas com Glaze Fluo caracterizam-se assim pela vivacidade natural e brilho.

DENTE
NATURAL



DENTE EM ZIRCONIA PRETTAU® 2
COM GLAZE FLUO




DENTE EM ZIRCONIA PRETTAU® 2
SEM GLAZE FLUO




Misturar bem a pasta de revestimento Glaze Fluo.



Aplicar com um pincel na superfície em zirconia de forma uniforme.

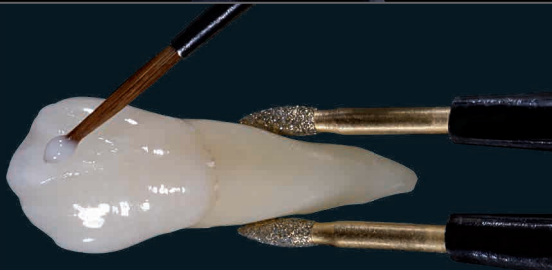

Vibrar com um instrumento irregular.

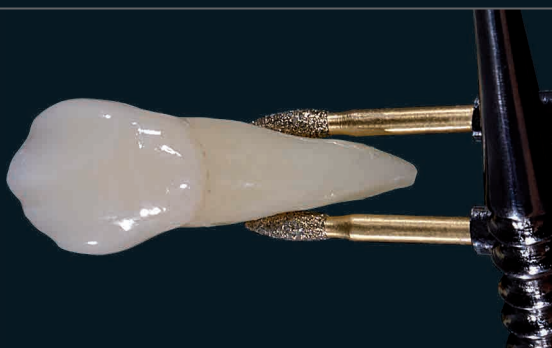

*Sob luz negra vê-se a fluorescência conseguida.
Controlar sob lâmpada UV se a distribuição do material está homogênea e, se necessário, corrigir.*



Lâmpada UV

Para a obtenção de um brilho natural queimar em vácuo a 660° durante um tempo de manutenção de 5 minutos.



Zirkonzahn®



Em comparação: molar não tratado; pré-molar após tratamento com Glaze Fluo

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Portugal – Luis Macieira – Tel +351 217 58 62 69 – zirkonzahnportugal@clix.pt

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



WEAB8107PT=

Sujeito a alterações técnicas; não nos responsabilizamos pela exactidão das informações. Versão: 27/02/2019