

Zirkonzahn[®]

Human Zirconium Technology



PRETTAU[®] 2 DISPERSIVE[®]

A cultura Zirkonzahn

PONTE PRETTAU® 2 DISPERSIVE® SOBRE BARRA EM TITÂNIO ANODIZADO

- Situação inicial:* Paciente de idade, desdentado do maxilar superior com quatro implantes
- Desejo do paciente:* Nova ponte de zircônia de alta qualidade, antiga restauração esteticamente e funcionalmente inadequada
- Material de dados:* Fotos, modelos de trabalho com implantes, digitalização da antiga restauração
- Estrutura planeada:* Ponte monolítica em Prettau® 2 Dispersive® sobre barra de titânio, estratificação de gengiva
- Realização:*
- Montagem de dentes baseada na antiga restauração no software Zirkonzahn.Modifier e adaptação das formas dentárias da biblioteca de dentes naturais com raízes "Heroes Collection"
 - Modelação da barra de titânio em Zirkonzahn.Modellier com base no wax-up da restauração planeada; fabrico e subsequente digitalização da barra de titânio
 - Modelação da estrutura de zircônia e controlo no articulador virtual
 - Fresagem da estruturado em Prettau® 2 Dispersive® na fresadora Zirkonzahn
 - Personalização ligeira da cor e sinterização da ponte
 - Individualização manual adequada à idade: pintura com ICE Stains by Enrico Steger, estratificação das áreas gengivais com Cerâmica ICE
 - Verificação no modelo, anodização da barra e cimentação
- Resultado:* Ponte Prettau® com óptima estética e função graças à boa cooperação da equipa de tratamento; após a colocação, o paciente exprime euforia: "A ponte é o meu melhor presente de Natal."



100% DESENHO MONOLÍTICO, ESTRATIFICADO APENAS NA ZONA GENGIVAL

TD Federico Presicci, Laboratório dentário Antonio Lazetera, Savona, Itália

Dr. Massimo Callerio, Cassolnovo, Itália



NOVO! PRETTAU® 2 DISPERSIVE®

- Zirconia pré-colorida com um gradiente de cor natural, particularmente translúcida e grande resistência à flexão e à fractura
- Sem limitações! Ideal para arcadas totais monolíticas, mas também para coroas individuais, inlays, onlays, facetas, barras e pontes de vários elementos, reduzidas ou monolíticas
- Através da conceção anatómica evita fissuras ou abrasão dos antagonistas
- Possível de caracterizar individualmente com os Colour Liquids Prettau® Aquarell Intensiv, ICE Ceramics e ICE Stains by Enrico Steger



HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

Zirkonzahn Portugal – Luis Macieira – Tel +351 217 58 62 69 – zirkonzahnportugal@clix.pt

Zirkonzahn Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com

NOVO!

FRESADORA M2 DUAL WET HEAVY METAL

UMA MÁQUINA,
DUAS CÂMARAS DE FRESAGEM

PARA PROCESSAMENTO HÚMIDO E
SECO SEQUENCIAL SEM PERDA DE
TEMPO DE LIMPEZA



HÚMIDO

SECO



WEAB2678PT=